

SCPL - Symbol producenta
SOMA2 - Kod produktu
EN 149:2001+A1:2009 - Norma Europejska
FFP3, FFP2, FFP1 - Klasa półmasek
NR - Maski jednorazowe - maksymalnie jedną zmianę roboczą (8h)
2841 - Numer jednostki notyfikowanej i sprawującej nadzór
EXP.MM.RRRR
MM - miesiąc produkcji
RRRR - rok produkcji
Znak CE - wyrób spełnia wymagania dyrektyw tzw. „Nowego Podejścia” Unii Europejskiej

**NDS - Najwyższe dopuszczalne stężenie

- 1. Należy zapoznać się z instrukcją producenta
- 2. Zakres temperatur
- 3. Maksymalna wilgotność względna


Sohbi Craft Poland Sp. z o.o.
Ostaszewo 57h, 87-148 Łysomice, Polska
Telefon: (+48) 56 649 56 00
E-mail: biuro@sohbi.pl

NORMA:
EN 149:2001 + A1:2009
ROZPORZĄDZENIE PEiR (EU) 2016/425

Jednostka Certyfikująca i Nadzorująca:
MNA LABORATUVARLARI SANAYI TICARET LIMITED ŞİRKETİ
KüçükbakkalköyMah. Yenidoğan Cad. No: 21
Ataşehir/İSTANBUL (NB 2841)
Country : Turkey

DEKLARACJA ZGODNOŚCI: www.sohbi.pl

Klasa ochrony	zakres stosowania - NDS**	Filtracja
FPP1 - filtracja ≥80%	4	filtracja ≥80% cząsteczek od wielkości 0,3 µm
FPP2 - filtracja ≥94%	10	filtracja ≥94% cząsteczek od wielkości 0,3 µm
FPP3 - filtracja ≥99%	30	filtracja ≥99% cząsteczek od wielkości 0,3 µm

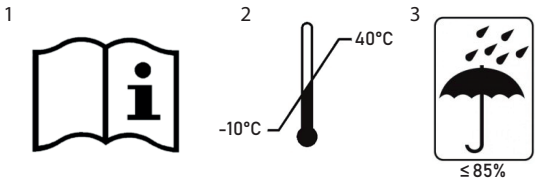

1. Przed nałożeniem półmasek umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj płynem na bazie alkoholu.




2. Zakryj nos i usta półmaską, następnie załóż elastyczne gumki na uszy.



3. Dognij elastyczny pasek tak, aby przylegał do grzbietu nosa.*



4. Aby zdjąć półmaskę złap ją za gumki (nie dotykaj przodu półmasek).

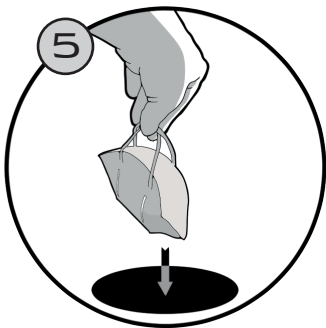

5. Ściągnięta półmaska nie nadaje się do ponownego użytku. Należy ją wyrzucić.

KLASA FFP2

PÓŁMASKA FILTRUJĄCA SOMA2



SCPL
Sohbi Craft Poland

PRZED UŻYCIEM:

Przed założeniem Półmasek należy sprawdzić datę przechowywania oraz stan półmasek i opakowania, czy nie zawiera widocznych uszkodzeń, zabrudzeń i czy jest kompletna. Półmaska która jest uszkodzona lub której czas przechowywania został przekroczony nie nadaje się do użytkowania. Przed rozpoczęciem użytkowania półmasek należy zapoznać się z treścią instrukcji. Użytkownik musi znać zasady użytkowania oraz przeznaczenie sprzętu. Przed użyciem półmasek należy znać rodzaj oraz stężenie aerozolu w miejscu użytkowania półmasek.

STOSOWANIE:

Półmaski filtrujące są jednorazowym środkiem do ochrony dróg oddechowych przed nietrutkowymi cząstkami stałymi i ciekłymi. Półmaski są wyrobem o wielkości uniwersalnej. Półmaski stosuje się maksymalnie 8 godzin (jedną zmianę roboczą).

KONSERWACJA:

Półmaski nie są przeznaczone do czyszczenia i dezynfekcji w celu ponownego użycia.

PRZECIWOZWSKAZANIA:

Półmaski należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu producenta w pomieszczeniu w temperaturze od -10 do +40°C i wilgotności mniejszej niż 85%, nie wystawiać na źródło światła, oraz na działanie substancji żrących, trujących i radioaktywnych. Maksymalny czas przechowywania wynosi 24 miesiące od czasu wyprodukowania.

TRANSPORT:

Półmaski mogą być transportowane jedynie w opakowaniu producenta.

PRZECIWOZWSKAZANIA ZWIĄZANE ZE STOSOWANIEM PÓŁMASKI

Stosowanie półmasek w pomieszczeniach o złej wentylacji lub małej kubaturze gdzie może występować zawyżenie niedoboru tlenu (stężenie poniżej 17%) - ryzyko niedotlenienia oraz mdłości.
Stosowanie półmasek w przypadku posiadania zarostu - ryzyko braku ochrony i nieszczelności.
Stosowanie półmasek w atmosferze gdzie rodzaj, stężenie oraz właściwości substancji szkodliwych nie są znane - ryzyko braku ochrony.
Półmaska nie chroni przed zanieczyszczeniami w postaci par i gazów.
Stosowanie półmasek w atmosferze zawierającej cząstki aerozoli w stężeniu przekraczającym zakres poszczególnych klas filtracyjnych według tabeli poniżej.
Używanie półmasek uszkodzonych lub po terminie przydatności oraz dłużej niż 8 godzin - ryzyko braku ochrony.
Transport lub przechowywanie w nieodpowiednich warunkach - ryzyko utraty właściwości ochronnych.
Stosowanie półmasek w niewłaściwych warunkach oraz nie przestrzeganie zasad jej użytkowania - ryzyko zatrucia.
Założenie półmasek niezgodne z instrukcją - ryzyko braku ochrony.
Modyfikowanie półmasek oraz jej mocowań - ryzyko braku szczelności i braku ochrony.
Wielokrotne użytkowanie półmasek oznaczonej literką "NR" lub dłużej niż 8 godzin - ryzyko braku ochrony

*Krawędź półmasek musi ściśle przylegać do twarzy, żeby nie było przecieku powietrza. W razie potrzeby wyreguluj przyleganie dopasowując elastyczny pasek do kształtu nosa lub skróć gumki na uszy, poprzez związanie ich.